

CONTROLE DE SANGRAMENTOS EM COMBATE

com Tecnologia Bioadesiva Catiônica (PBT[®])

utilizado em
**COMBATES
REAIS**

axiostat[®]
pare de sangrar num instante

APRESENTAÇÃO
PowerPoint com Vídeos



A versão MILITAR / POLICIAL de Axiostat[®] - Tampão Hemostático 100% Quitosana foi desenvolvida para ser utilizado em campos de batalha e em zonas de conflito. Sua resistente embalagem estéril é de fácil transporte e pode ser aberta com apenas uma mão.

 ANVISA 82407250001

axiostat®

pare de sangrar num instante

Descritivo Técnico:

Axiostat® é um Tampão Hemostático 100% Quitosana, estéril, não absorvível, não alergênico, de uso único, com a exclusiva Tecnologia Bioadesiva Catiônica - PBT® desenvolvido para controlar hemorragias moderadas a graves em ferimentos ocorridos em campos de batalha ou zonas de conflito.

Saiba mais em: www.axiostat.com.br


- ✓ Estéril, Pronto para uso
- ✓ Hipoalergênico, Não Exotérmico, Não Pirogênico
- ✓ Ativo em todos os lados
- ✓ Protege contra infecções
- ✓ Pode ser cortado, dobrado e inserido em ferimentos profundos, tais como perfurações (PAF/PAB).

Indicações de Uso:

- ▶ Hemorragias arteriais e venosas
- ▶ Sangramentos oriundos de ferimentos a bala
- ▶ Lesões decorrente de explosões
- ▶ Punhaladas ou perfurações por objeto contundente
- ▶ Cortes e lacerações diversas

Dados Clínicos

tempo em minutos

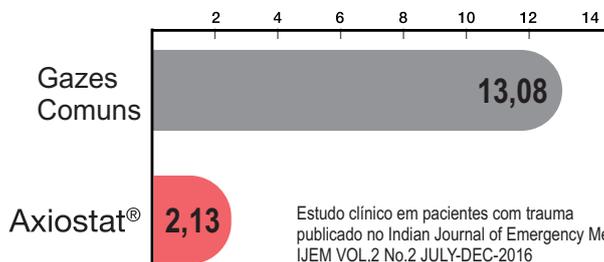

Ref. MIL88: 8x8cm

Como usar Axiostat®




Aplice Axiostat® com pressão uniforme até ele aderir ao ferimento. Uma vez aplicado, não levante ou remova, nem mesmo para checar a hemostasia.



Faça uma bandagem secundária para manter Axiostat® seco e fixo na posição.



Após 15 minutos Axiostat® pode ser removido. Irrigue com soro fisiológico e remova-o delicadamente.

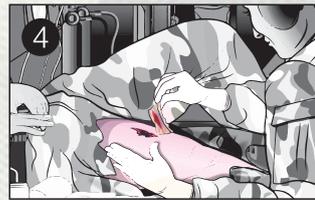

A remoção ocorre de maneira indolor e sem reabrir o ferimento, facilitando o atendimento médico na sequência.



Para controlar os sangramentos em ferimentos transfixantes ou profundos, Axiostat® pode ser aplicado como ilustrado.

Produzido por:

AXIO®

Axio Biosolutions Private Limited
Plot 18, Gujarat Pharma Techno Park
Sari Matoda, Sanand Taluka
Ahmedabad - 382 220, Gujarat, India.
Mfg License: G/25/2176

Importado por:

BIOTECHS
import & export

CNPJ 21.155.993/0001-40
(82) 3142-1655
sac@biotechs.med.br
Av. Cid Scalla, 86 - Poço
CEP 57025-620 Maceió-AL

Como funciona?

